



CARA THREAD SERIES дарит Вам возможность осуществить мечты естественным и безопасным способом.

Понятие тредлифтинга

Тредлифтинг (threadlifting, от англ. thread – нить и lifting – подтяжка) – направление малоинвазивной эстетической медицины, основанное на использовании внутрикожных нитевых биodeградантов, родоначальницей которого изначально стала полостная хирургия.



Научно доказано, что некоторые рассасывающиеся шовные материалы в коже (полидиаксонон, например), внедренные в кожу, в процессе своего распада способствуют значительному обновлению дермальных структур, в первую очередь, коллагеновых и эластиновых волокон, что способствует постепенному значительному уплотнению и омоложению кожи.

Показания для тредлифтинга

Лицо:

- опущение бровей
- межбровные морщины
- морщины вокруг губ
- «гусиные лапки» вокруг глаз
- вялая кожа, теряющая упругость
- «поплывший» овал лица
- «кольца возраста» на шее
- морщины в зоне декольте
- асимметрия после пластических операций
- носогубные складки «марионетки»

Тело:

- дряблость кожи на животе, ягодицах, внутренней поверхности рук
- неровный рельеф кожи, в том числе после липосакции
- стрии (до года)

Противопоказания к тредлифтингу

Процедура тредлифтинга недопустима в тех случаях, если клиент страдает заболеваниями крови с нарушениями ее свертываемости (гемофилия, например), ишемической болезнью сердца, диффузными заболеваниями соединительной ткани (склеродермия, например).

Помимо этого, процедура не производится в случае беременности пациентки, в период лактации, при ОРВИ и прочих состояниях с повышением температуры тела, герпетических высыпаниях, воспалительных изменениях в месте планируемой интеграции нитей, а также при психических нарушениях.

Тредлифтинг CARA – передовой рубеж малоинвазивного безопасного омоложения

Современная эстетическая медицина, ставшая к настоящему моменту мощной индустрией как часть превентивной медицины, зачастую отличается агрессивной рекламой и обещаниями скорого и безопасного омоложения. На рынке регулярно появляются разнообразные методики, которые дают, как правило, выраженный эффект, однако отсроченный результат зачастую не оправдывает ожиданий. Известны случаи злоупотребления мощными абляционными процедурами, лазерами, филлерами и глубокими пилингами. В связи с этим все большую актуальность приобретают методы, суть которых – малоинвазивность, а результат незамедлителен, однако пролонгирован и постепенно нарастает после самого факта процедуры. Этим требованиям максимально отвечает новая технология безопасного тредлифтинга CARA, основанная на использовании инновационных мононитей (MONO, GOLD, COG THREADS) и мультиволоконных микронитей (MULTI, SCREW, DUPLEX THREADS).

Особенностями данного anti-age метода являются следующие его характеристики:

- Нити вводятся как очень тонкие и практически неощутимые акупунктурные иглы на глубину сетчатой дермы. Эта процедура безопасна и хорошо переносима клиентами даже без анестезии.
- Малоболезненность, малокровность и инфекционную безопасность процедуре тредлифтинга CARA обеспечивают сверхострая гибкая игла из медицинской стали (Япония) и гемостатическая губка, аффилированная с иглой.
- Нити CARA обладают высокой устойчивостью к биодegradации. Через 60-80 дней нити сохраняют 50% своей изначальной целостности, через 240 дней они полностью рассасываются.
- Реакцией ткани на нити CARA является образование мягкого ретикулярного коллагена.
- Новообразованный коллаген выполняет функцию каркаса кожи на протяжении 18-24 месяцев.



Исторические аспекты тредлифтинга

Наблюдения большого количества оперирующих хирургов и проведенные многочисленные исследования показали, что некоторые рассасывающиеся шовные материалы в коже в процессе своего распада способствуют значительному обновлению дермальных структур, в первую очередь, коллагеновых и эластиновых волокон, что способствует постепенному значительному уплотнению и омоложению кожи, не говоря уже о выраженном антигравитационном эффекте, которые способны оказать нити, внедренные в ткани кожи.

Среди создателей методик тредлифтинга стоит упомянуть о **Рене Гильмене** из Франции (первое сообщение о нитевой подтяжке было сделано им в 1970 году), итальянце **Серджио Капурро** (первая публикация о нитях для омоложения в 1982 году), японце **Акире Ахаи** (1986), знаменитом грузинском хирурге **Марлене Суламанидзе** (1997), испанце **Максимилиано Флоресе Мендесе** (окончательно «узаконил» термин «нитевой лифтинг» в мировой медицинской литературе).


В России история успешного применения рассасывающихся нитевых структур для омоложения лица и тела насчитывает к настоящему моменту не более 10 лет и можно уверенно сказать, что южнокорейские производители являются основными поставщиками материалов для тредлифтинга на мировой рынок. Выбор этот мы сделали не случайно, так как в настоящее время они наиболее эффективны и безопасны, блестящим примером чему является продукция торговой марки **CARA** (производитель завод медицинских изделий MÄS, Сеул, Южная Корея).



Технические характеристики и достоинства эксклюзивных нитей CARA


Нити CARA применяются с целью омоложения дермальных структур кожи лица и тела. Выполнены с учетом международных требований к кожным биодеградантам:

1. Абсолютная стерильность.
2. Инертность. Достигается благодаря использованию 2 главных ингредиентов: полидиаксонона (PDO) и полигликолевой кислоты (PGA).
3. Прочность.
4. Надежность фиксации в тканях.
5. Резистентность к инфекции.
6. 100% биодеградация.
7. Мягкость, пластичность, хорошие манипуляционные свойства.
8. Применимость для любых тредлифтинговых операций.
9. Отсутствие электронной активности (важно для стареющей насыщенной свободными радикалами кожи!).
10. Отсутствие аллергенных свойств.
11. Полиструктурность. По структуре нити могут быть: монополь или одноволоконная — это нить, состоящая из единого цельного волокна. К этой разновидности нитей относятся MONO, GOLD, COG THREADS. Многоволоконная (полифиламентная) бывает крученая или плетеная. К этой разновидности нитей относятся MULTI, SCREW, DUPLEX THREADS). Преимущества и особенности каждой из данных групп представлены далее в описаниях отдельных позиций бренда CARA.

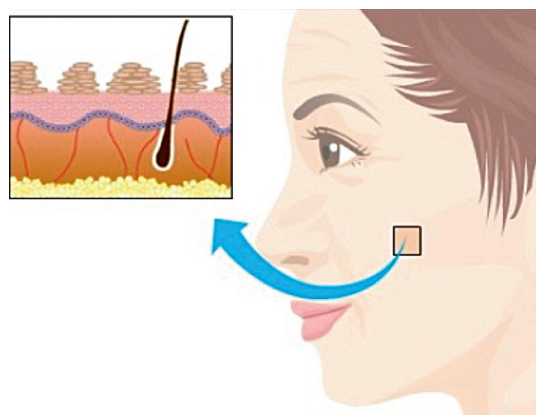

- ☑ CARA Thread
- ☑ CARA Screw Thread
- ☑ CARA Multi Thread
- ☑ CARA Multi Screw Thread
- ☑ CARA Gold Thread
- ☑ CARA Duplex Thread
- ☑ CARA Cog Thread

CARA THREAD

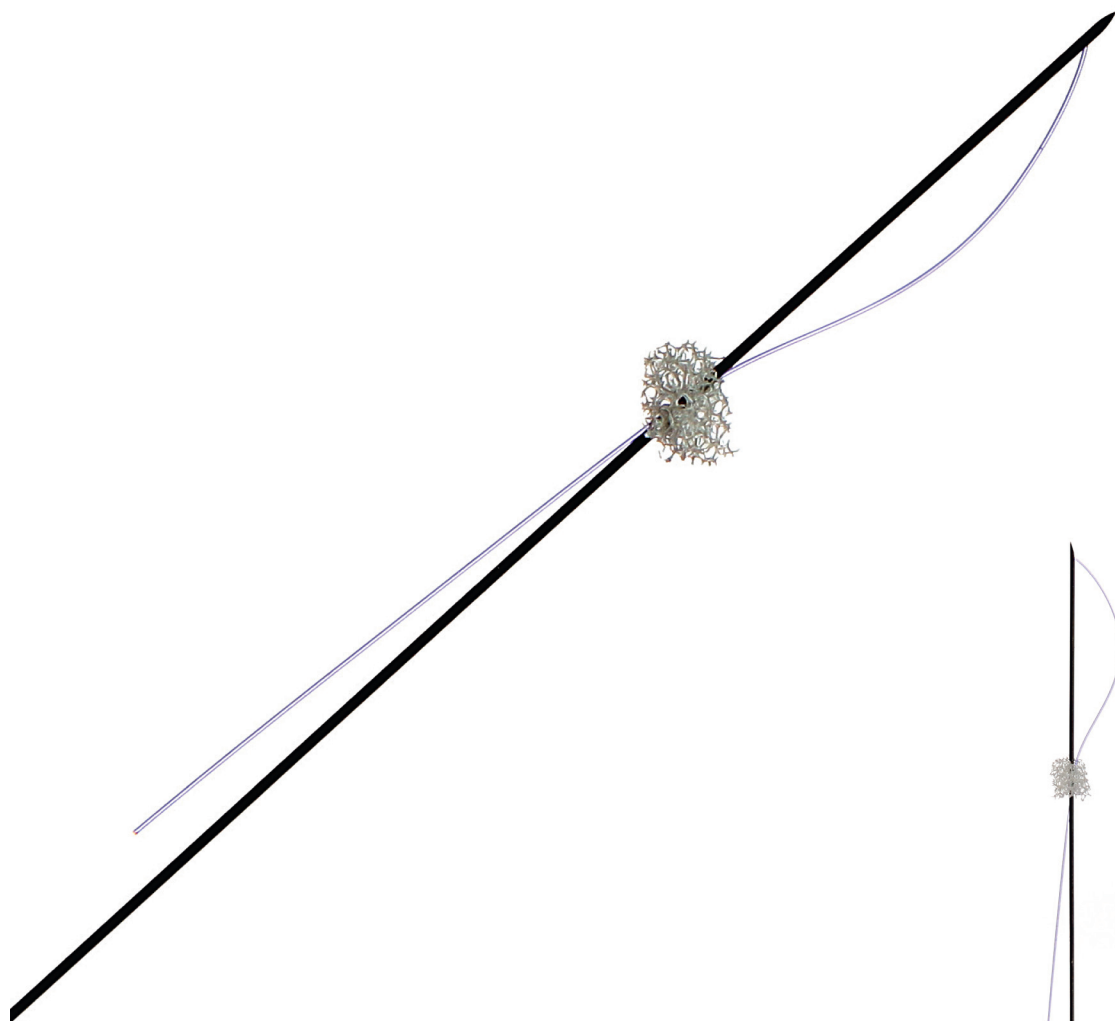

Характеристики CARA Thread

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ
M2638	26 G	38mm
M2650		50mm
M2660		60mm
M2690		90mm
M2938	29G	38mm
M2950		50mm
M3025	30G	25mm
M3038		38mm



CARA MONO THREAD


Имплантируемые нити для наложения швов сделаны из PDO (полидиоксанона) – материала, безопасного и применяемого в кардиохирургии. На введение чужеродного для организма материала в момент постановки нити происходит формирование специфического иммунного ответа. Это проявляется реакцией асептического воспаления. Результатом имплантации нитей является процесс неокollaгенеза и неоваскуляризации – формирования дополнительных коллагеновых, эластиновых, ретикулярных волокон, новых сосудов, который сопровождается эффектом лифтинга.

Принцип нитей CARA Thread

Иммунная система реагирует на имплантированные нити как на что-то чужеродное. А потому старается избавиться от них.

Имплантированные нити запускают асептическую воспалительную реакцию в дерме.

Результат – улучшение состояния кожи клиента благодаря повышению образования коллагена и усилению кровообращения. Более того, за счет натяжения нитей достигается лифтинг-эффект.

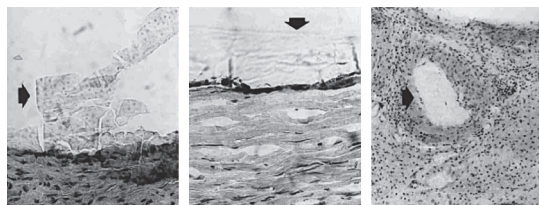

*PDO ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

*Имплантированные нити полностью рассасываются за 6 месяцев, образуя каркас из нового коллагена

Клинические эффекты CARA Thread

- Мощный лифтинг, подтяжка и моделирование
- Укрепление кожи благодаря реконструкции коллагенового каркаса
- Омоложение и осветление, улучшение состояния кожи за счет усиления кровоснабжения
- Разглаживание морщин
- Заполнение атрофических рубцов
- Сочетанное использование с ботулотоксином, лазерными методиками, инъекционными миорелаксантами, филлерами, биоревитализацией, мезотерапией, пилингами, PRP, электропорацией и эстетическим уходом
- Моментальный видимый эффект
- Высокая удовлетворенность результатами процедуры

CARA SCREW THREAD


Скрученные нити CARA Screw Thread основаны на мононитех CARA Mono Thread. Для этой разновидности мононить обматывается вокруг иглы из нержавеющей стали японского производства для выполнения функции интрадермальной поддержки. В некоторых случаях мононить и скрученная нить используются в сочетании с различными видами нитей, такими как золотая, двойная, зубчатая и мультинить.

Характеристики CARA Screw Thread

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ
H2660	26G	60mm
H2690		90mm
H2938	29G	38mm
H2950		50mm



CARA MULTI THREAD

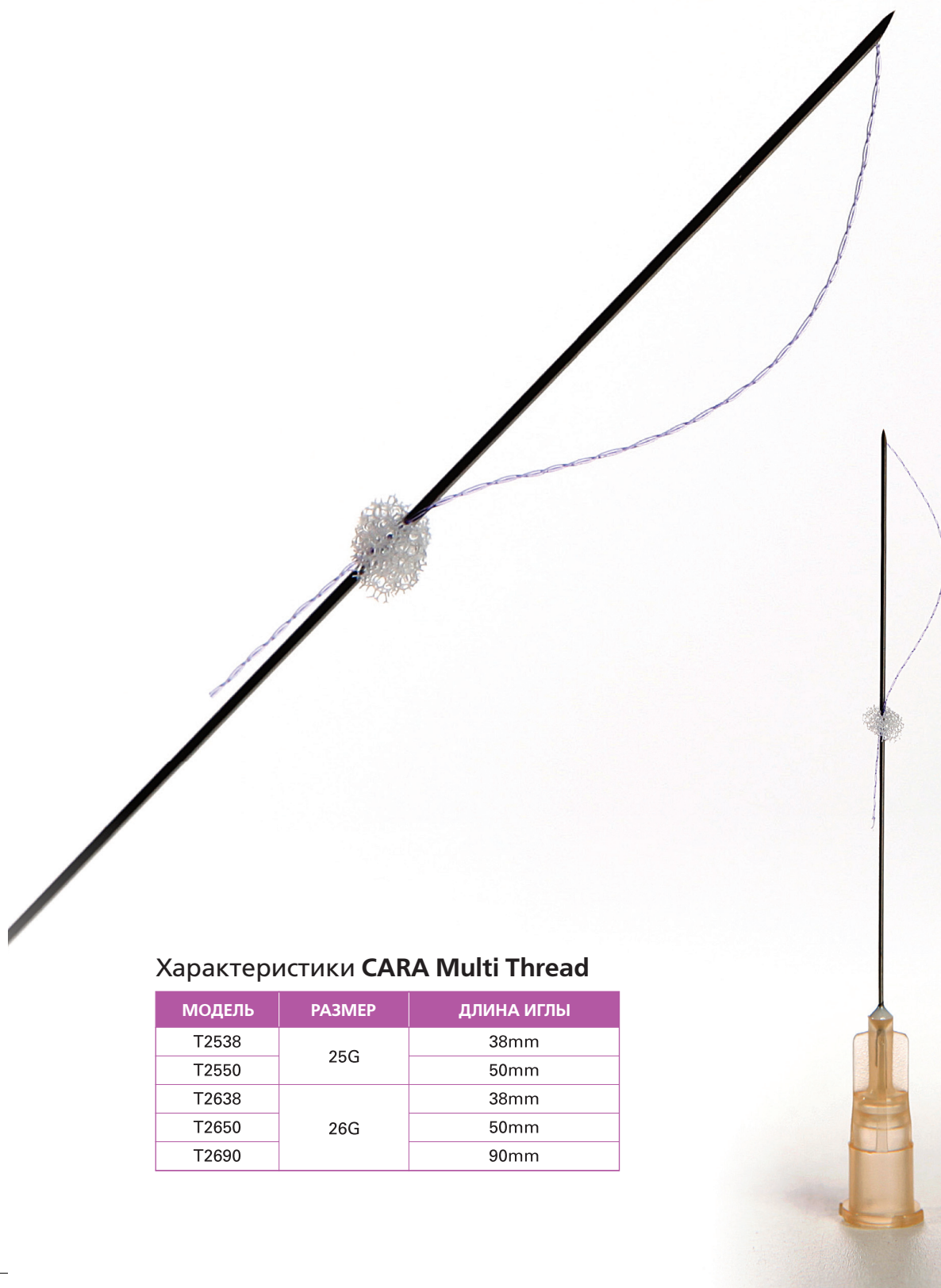

Характеристики **CARA Multi Thread**

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ
T2538	25G	38mm
T2550		50mm
T2638	26G	38mm
T2650		50mm
T2690		90mm


CARA MULTI THREAD

Введение мультинитей CARA Multi Thread интенсивно стимулирует ткани кожи, что приводит к их быстрому восстановлению и реструктурированию.

CARA Multi Thread дают превосходный результат, когда есть необходимость разгладить морщины, выровнять рельеф кожи и повысить ее эластичность. Лифтинг-эффект при использовании Multi Thread выражен гораздо сильнее, чем при использовании мононитей.

Преимущества CARA Multi Thread

- Более выраженный лифтинг-эффект
- Высокая удовлетворенность клиента лифтинг-уходом даже без филлеров и ботокса
- Максимальная прочность
- Экономичный расход нитей

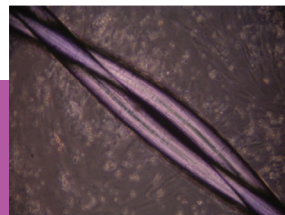

CARA MULTI SCREW THREAD


Инновационные скрученные мультинити CARA Multi Screw Thread (изогнутые скрученные нити) основаны на мультинитях CARA Multi Thread. Для этой разновидности скрученная нить обматывается вокруг иглы для выполнения функции интрадермальной поддержки.

- Применяются для коррекции глубоких складочных морщин и выраженного птоза
- Имеет пролонгированный омолаживающий эффект
- Выраженный лифтинг-эффект и подтяжка кожи благодаря механизму «памяти», которая присуща скрученной в спираль нити



Характеристики CARA Multi Screw Thread

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ
TH2538	25G	38mm
TH2550		50mm
TH2638	26G	38mm
TH2650		50mm
TH2690		90mm

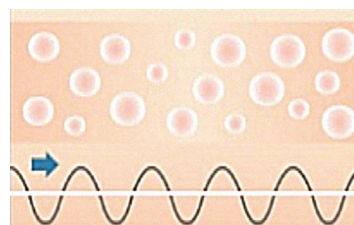

PDO

CARA GOLD THREAD



Характеристики CARA Gold Thread

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ
G2638	26G	38mm
G2650		50mm
G2938	29G	38mm
G2950		50mm



CARA GOLD THREAD

Нити, ламинированные золотом с использованием высоких технологий.

Нити обладают более пролонгированным эффектом, чем чистые PDO-нити, благодаря более продолжительному периоду рассасывания. Имплантированное чистое золото постепенно абсорбируется и выводится из организма.

PDO + покрытие из чистого золота вызывают асептическую воспалительную реакцию со стороны иммунной системы.


Нити Gold Thread обеспечивают заметное улучшение состояния кожи благодаря усилению кровотока, образованию новых капилляров, улучшению тканевого дыхания.

Нити Gold Thread стимулируют синтез коллагена и эластина. Синтезированные таким образом коллаген и эластин являются натуральными и абсолютно безопасными для организма.

Преимущества CARA Gold Thread

- Самые multifunctional из семейства нитей CARA
- Выраженно улучшается цвет лица
- Минимизируется пигментация
- Морщины (даже глубокие!) разглаживаются
- В коже – интенсивное образование мягкого коллагена и эластина. Результат – долгий лифтинг без образования рубцов и рубцовых атрофий
- Ионы золота обогащают клетки кислородом
- Способствуют выведению токсинов
- Природный антиоксидант

Gold Thread – Чистое золото в составе

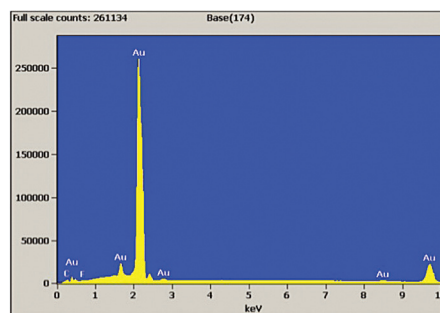


(Номер патента 10-2012-0036226)

99.99% чистое золото; золото с медью без примесей


Другое название "Золотой лифтинг" – сплав с медью.

Однако, золотые нити на 99,99% состоят из чистого золота.

Метод производства защищен патентным законом.

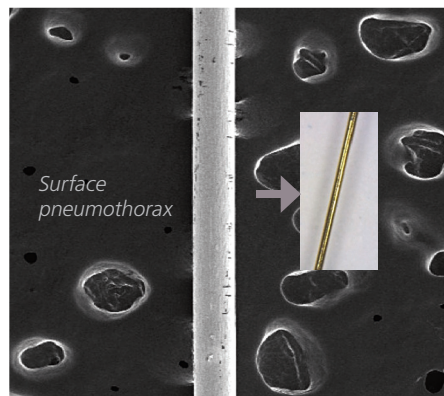


ПРОТЯЖЕННОСТЬ GOLD THREAD (80X)

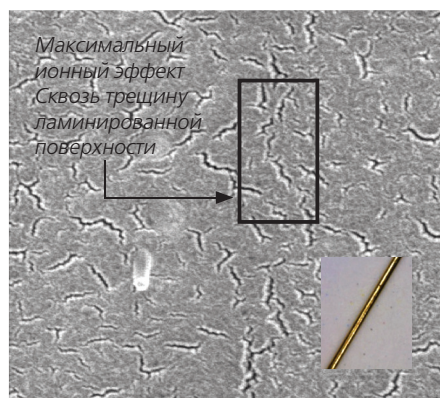

ПОВЕРХНОСТЬ GOLD THREAD (20,000X)

CARA DUPLEX THREAD

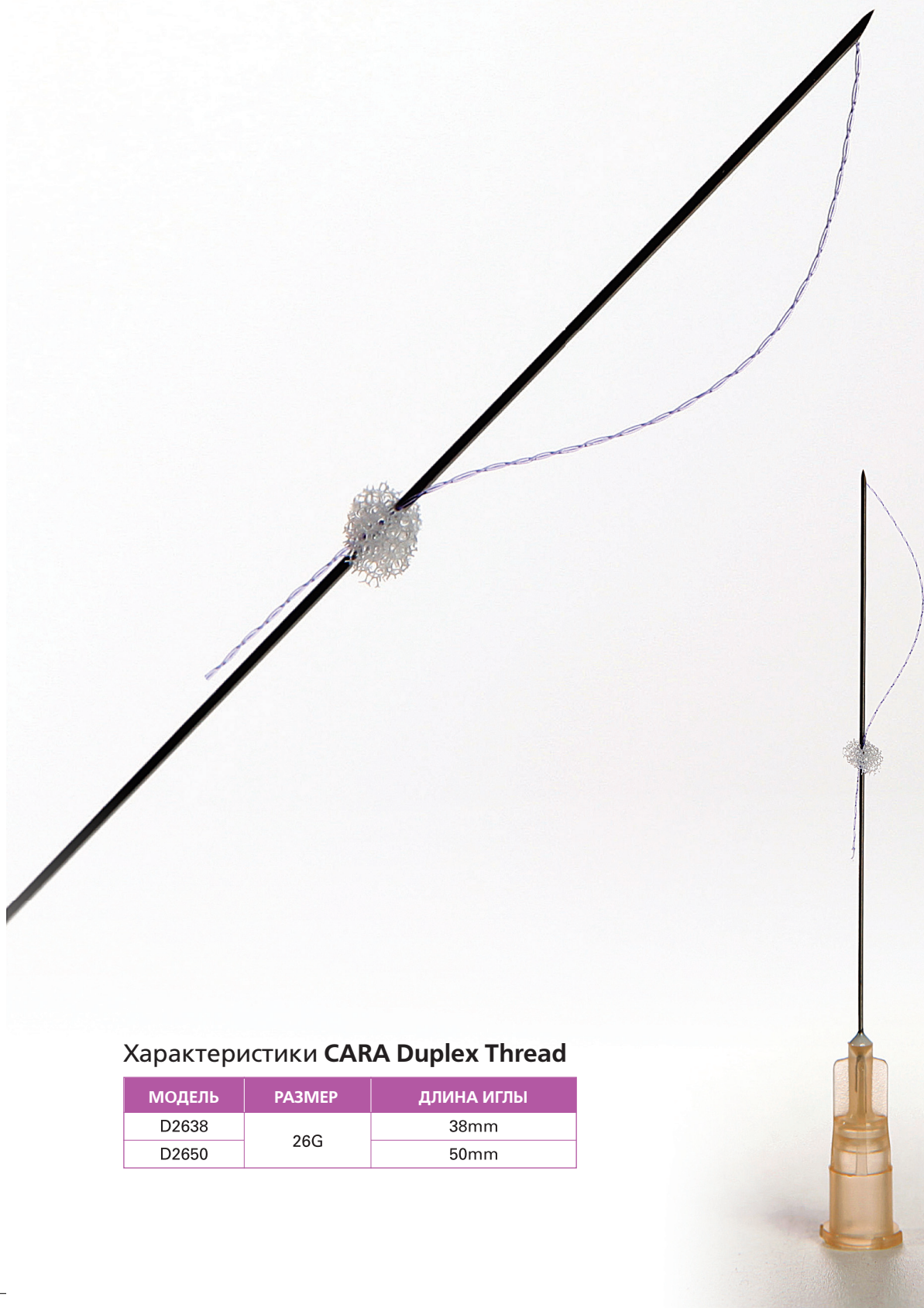

Характеристики CARA Duplex Thread

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ
D2638	26G	38mm
D2650		50mm

CARA DUPLEX THREAD


Представляем первые в мире PGA + PDO нити. Нити состоят из двух полимеров – PGA (полигликолевая кислота) и PDO (полидиоксанон), которые используются в кардиохирургии в качестве безопасного шовного материала.

Разная скорость биodeградации каждого компонента позволяет максимально быстро улучшить качество кожи и обеспечить более пролонгированный результат лифтинга.


Преимущества CARA Duplex Thread

- Высокая результативность лифтинг-процедуры
- Стимулирование синтеза коллагена и эластина, повышение эластичности кожи и улучшение кровообращения
- Более выраженный лифтинг-эффект и укрепляющее воздействие у мультинитей, чем у мононитей
- CARA Duplex Thread + Филлер или Ботокс = Максимальная результативность
- Вдвойне выраженный подтягивающий эффект
- Без разрезов и рубцов
- Без наркоза
- Отсутствие периода реабилитации


Принцип нитей CARA Duplex Thread

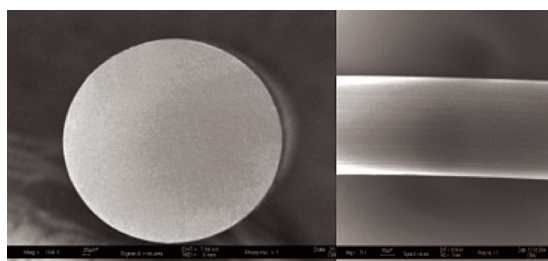


PDO (МОНОНИТИ)

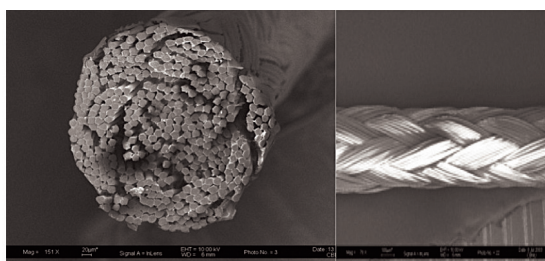

PGA (МУЛЬТИНИТИ)

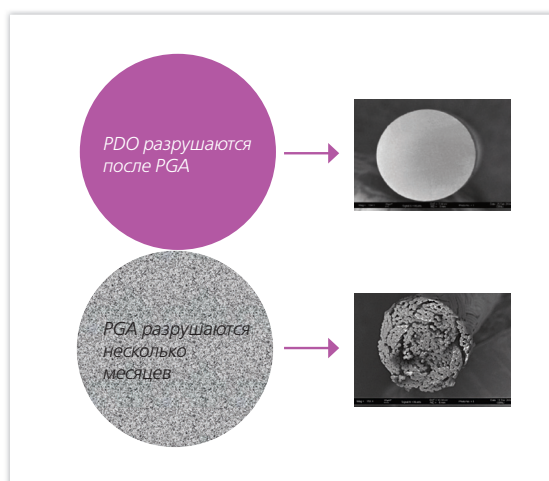

CARA COG THREAD

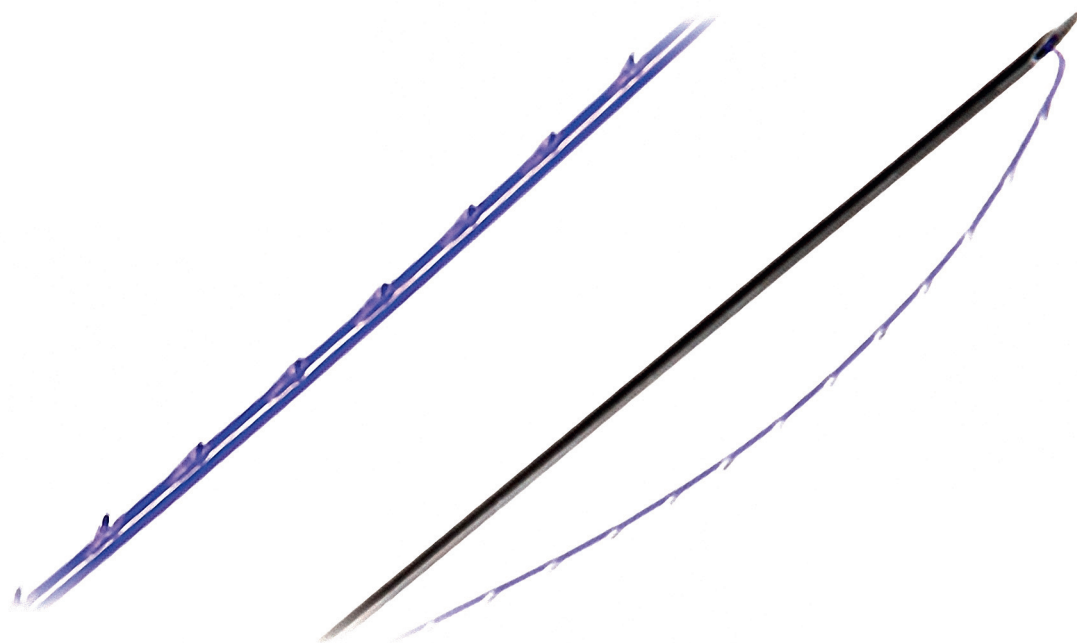

Характеристики CARA COG THREAD

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ	ДЛИНА PDO		ФОРМА
M19B1014	19G	100	140	1-0	
M23D3009	23G	60	90	3-0	
M23D3011		90	110		
M23E3009		60	90		
M23E3012		90	120		


МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ	ФОРМА
C2338	23G	38mm	
C2360		60mm	
C2390		90mm	



CARA COG THREAD

CARA Cog Thread – биоразрушаемые мононити с зубчиками, используемые в хирургии как шовный материал. Нити CARA Cog Thread способны оставаться в тканях более продолжительное время.

Зубчики становятся поддерживающей структурой для мягких тканей, когда нити вводятся под кожу.

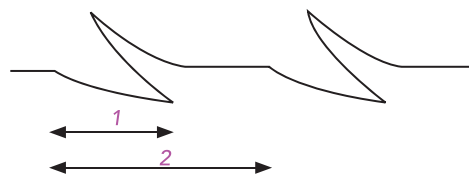


1 – ширина зубчика, 2 – расстояние между зубчиками
Чем меньше расстояние (2) и больше ширина (1), тем прочнее нить цепляется, и процедура требует больше времени и усилий.




Сила сцепления / Предел прочности при растяжении
Эффективный лифтинг и широкое клиническое использование зубчатых нитей CARA Cog Thread объясняется тем, что они обладают более высокими силой сцепления и максимальной прочностью при растяжении, чем обычные, нарезанные нити, и позволяют достичь прекрасных результатов при лифтинг-процедурах для лица и тела, не требуя дополнительных манипуляций во время проведения процедуры.

Принцип нитей CARA Thread

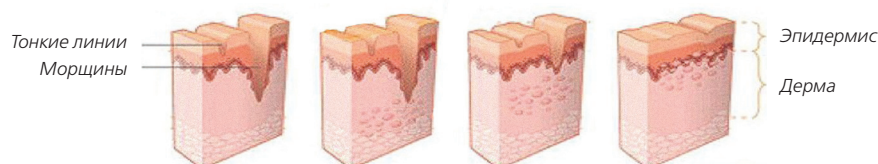

Импантированные в кожу нити CARA thread запускают процесс регенерации и реструктуризации тканей кожи, повышая ее плотность.

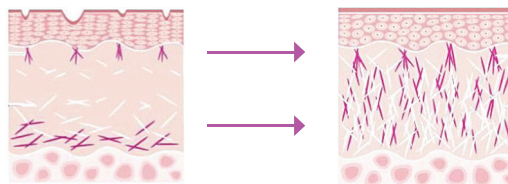

Преимущества CARA Cog Thread

- Обладают значительно большей стабильностью и пролонгированным эффектом
- Позволяют достичь максимального лифтинга лица, сравнимого с результатом пластической операции
- Обеспечивают 3D моделирование лица

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР CARA / МОСКВА

Компания **BalanceMedEsthetic** – официальный дистрибьютор мезонитей CARA – предлагает различные формы обучения методике тредлифтинга:

- Индивидуальная постановка руки;
- Регулярно проводимые семинары в учебном центре;
- Выездные мастер-классы и демонстрации в клиниках;
- Углубленные мастер-классы для практикующих врачей («Глаза», «Кисти рук», «Зона декольте», «Тело: коррекция спины, живота, плеч и голеней», «Сог-тредлифтинг» и др.)
- Регулярные конференции с демонстрацией ведущими мировыми специалистами тредлифтинга;
- Выездные обучения методике в Сеуле (Юж. Корея);
- Мастер-классы для «продвинутых пользователей».



Особое внимание уделяется правильному подбору нитей по размеру и длине, а также типу (линейные «mono», косички «twin», пружинки «screw», с насечками «sog» и пр.) в зависимости от зоны коррекции. Сочетание уникальных свойств материала нитей, высокое качество стали и особая заточка иглы производства Японии, а также интересные авторские методики имплантации нитей позволило максимально реализовать все возможности технологии тредлифтинга мезонитями CARA.

Удобный конференц-зал с большим экраном и проектором, просторные процедурные кабинеты создают дополнительные удобства и способствуют максимальному усвоению материала.

Все врачи, прошедшие обучение по методике тредлифтинга мезонитями в компании BalanceMedEsthetic получают сертификат. Каждому врачу обеспечивается индивидуальный подход и консультационная поддержка. После обучения действуют специальные цены на последующие закупки расходных материалов (мезонитей CARA) и система скидок.


Нити сертифицированы согласно ГОСТ ISO 10993-99.

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ



Ананикян Нана Левоновна

- Врач-дерматолог
- Руководитель направления «Биоревитализация и пилинги»
- Сертифицированный тренер международного класса
- Практикующий специалист в области контурной пластики, ботулинотерапии и тредлифтинга
- Член Общества специалистов эстетической медицины
- Руководитель косметологической клиники IPM

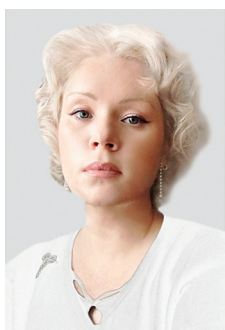

Лебедюк Виктория Георгиевна

- К.м.н.
- Врач-хирург, косметолог
- Специалист по инъекционным методикам
- Научный консультант-эксперт научно-образовательного центра «Эксперт» (Москва)
- Сертифицированный тренер компании MERZ AESTHETIC, автор методик по контурной пластике лица и губ



Плиева Лариса Нодаровна

- Врач-косметолог
- Сертифицированный тренер компании BalanceMedEsthetic
- Практикующий специалист в области инъекционной косметологии и тредлифтинга



Несмеянова Вера Станиславовна

- Врач-дерматолог, косметолог
- Ведущий специалист по методикам омоложения
- Сертифицированный тренер компании BalanceMedEsthetic


СЕРТИФИКАТЫ



Сертификат изготовителя



CE

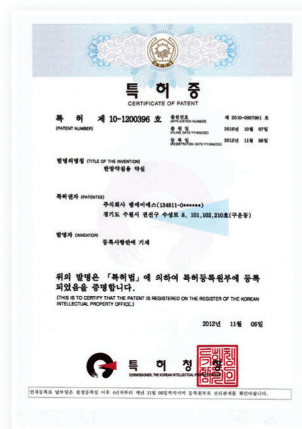

Патент на нити



ISO 13485



Annex research institute



GMP

Нити CARA Thread в настоящий момент находятся на регистрации в Минздраве РФ как изделие медицинского назначения «Нити рассасывающиеся из полидиоксанаона стерильные одноразовые с иглой». Номер входного документа №17039.

СОСТАВ ПРОДУКТА



Компонент: PDO (полидиоксанон)
Упаковка: 100 шт. (по 20 шт.)
Хранение: При комнатной температуре (1~30°C)





BalanceMedEsthetic

Адрес: Москва, пр-т Вернадского, д. 37, кор. 2, оф. 18-20

Тел.: +7 (495) 647-19-89, +7 (495) 938-93-63, +7 903 628-45-51

info@balancemed.ru

www.balancemedesthetic.ru

Сильная концепция для сильных партнеров

Компания BalanceMedEsthetic всегда рада новым партнерам и

создает выгодные условия для сотрудничества и развития, чтобы

Ваш салон всегда оставался одним из самых конкурентоспособных!